



Checklist

Diabetesverpleegkundige (1/2)



Loop
CamAPS IFX

Gebruik dit formulier om uw patiënt goed voor te bereiden op de instructie. Deze Checklist helpt u bij de stappen vanaf pompaanvraag tot en met de start op insuline.

1 Check voorafgaande aan de keuze voor mylife Loop of de patiënt het systeem kan gebruiken.

- a** Patiënt gaat systeem als HCL gebruiken en heeft een Android smartphone met een besturingssysteem dat compatible is met de CGM sensor.

Check via mylife-diabetes.info of via de QR-code

Patiënt heeft
een Dexcom
G6 sensor



Patiënt heeft
een Freestyle
Libre 3 sensor



- b** Patiënt gaat gebruik maken van kant en klare Pumcarts NovoRapid ☐
- c** Patiënt gaat gebruik maken van YpsoPump Inset (soft) of mylife Orbit Micro (staal) infuussets ☐

2A Doe de aanvraag in het portaal van de Medische Speciaalzaak:

- a** Bestel de mylife YpsoPump ☐
- b** Bestel de Dexcom G6 of FSL3 sensoren (indien nodig) ☐
- c** Bestel de mylife Orbit Micro (staal) of YpsoPump Inset (soft) infuussets ☐
- d** Selecteer soort instructie ☐
 - o Online (E-learning)
 - o Thuis (E-learning met begeleiding)
 - o Polikliniek (E-learning met ziekenhuisinstructie)
- e** Vraag aan en motiveer indien Patiënt een 3 maanden ervaringsperiode nodig heeft ☐
 - I.g.v. Bosman in hun aanvraagportaal door deze optie te selecteren
 - I.g.v. Mediq via www.mylife-diabetes.info, (wachtwoord Ypsomed!), menu 'Ervaringsperiode'



Checklist

Diabetesverpleegkundige (2/2)



Loop
CamAPS I FX

2B Verstrek Patiënt het volgende:

- a Het 'Formulier Therapiegegevens' ingevuld met de gevraagde gegevens ☐
- b Een (recept voor een) 2-tal kunststof ampullen zoutoplossing 10 ml ☐
- c Een spuit met luerlock aansluiting met bijpassende naald ☐
- d Een recept Pumpcarts NovoRapid, Pumpcarts Fiasp ☐

3 Patiënt is minimaal 1 week voor de start met insuline gestart met de sensor ☐

4 **E-learning instructie of E-learning met Begeleiding instructie:**
"De patient heeft mij gebeld voor het plannen van de start met insuline (pompstart)" ☐

E-learning met Ziekenhuisinstructie:
"De instructeur heeft i.o.m. mij een datum voor de instructie in het ziekenhuis gepland" ☐

5 Tijdens de therapiestart met insuline: ☐

- heeft de patient het certificaat van de mylife YpsoPump e-learning aan mij overlegd
- zijn de basaalstanden in de pomp gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd
- zijn de boluscalculator settings gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd
- zijn de alarmen/meldingsinstellingen gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd