

Checklist


Diabetesverpleegkundige (1/2)

Gebruik dit formulier om uw patiënt goed voor te bereiden op de pompinstructie.
Deze checklist helpt u bij de stappen vanaf pompaanvraag tot en met de start op insuline.

1 Check voorafgaand aan de keuze voor myLoop of uw patiënt het myLoop systeem kan gebruiken.

- a** Patiënt gaat myLoop systeem als HCL gebruiken en heeft een Android of iOS smartphone met een besturingssysteem dat compatible is met de CGM sensor.

Check de compatibiliteit van de CGM sensor via de QR-code:

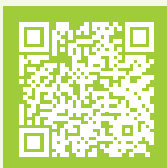

Patiënt heeft een
Dexcom G7 sensor



Patiënt heeft een
Freestyle Libre 3+ sensor

- b** Patiënt gaat gebruik maken van myInset, my Orbit Micro of my Orbit Soft
c Patiënt gaat zelf reservoirs vullen met het myPump+ Reservoir

2 Doe de aanvraag in het portaal van de Medische Speciaalzaak:

- | | |
|---|--|
| a Bestel de YpsoPump | ☐ |
| b Bestel, indien nodig, een Dexcom G7 of FSL3+ sensor | ☐ |
| c Bestel myInset, my Orbit Micro of my Orbit Soft infuusset | ☐ |
| d Bestel het myPump+ Reservoir om reservoirs zelf te kunnen vullen | ☐ |
| e Selecteer het type instructie | |
| <ul style="list-style-type: none"> Patiënt doet e-learning én pompinstructie zelfstandig.
<i>Patient neemt zelf contact op om datum voor pompstart (start op insuline) in te plannen. Zie punt 5</i> Patiënt doet e-learning zelfstandig, krijgt pompinstructie thuis met begeleiding. Patiënt doet e-learning zelfstandig, krijgt pompinstructie in het ziekenhuis. | ☐
☐
☐ |

3 Geef uw patient het volgende mee:

- | | |
|---|--------------------------|
| a Het 'Formulier Therapiegegevens' ingevuld met de gevraagde gegevens | ☐ |
| b Een (recept voor een) 2-tal kunststof ampullen zoutoplossing 10 ml | ☐ |
| c Een spuit met luerlock aansluiting met bijpassende naald | ☐ |
| d Een recept 10 ml flacons insuline om zelf myPump+ Reservoirs mee te vullen | ☐ |

Checklist

Diabetesverpleegkundige (2/2)

4 Zorg ervoor dat uw patient minimaal 1 week voor de start op insuline is gestart met de CGM sensor ☐

5 **Pompinstructie zelfstandig of thuis met begeleiding:**
'De patiënt heeft mij gebeld voor het plannen van de start met insuline (pompstart)' ☐

Pompinstructie in het ziekenhuis:
'De instructeur heeft i.o.m. mij een datum voor de instructie in het ziekenhuis gepland' ☐

Tijdens de therapiestart met insuline: ☐

- Heeft de patient het certificaat van de YpsoPump e-learning aan mij overlegd.
- Zijn de basaalstanden in de pomp gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd.
- Zijn de boluscalculator settings gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd.
- Zijn de alarmen/meldingsinstellingen gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd.

6 Na de start op insuline kan uw patiënt naar huis en indien nog nodig de pomp en sensor koppelen met de CamAPS FX app. Gaat dit niet goed, dan neemt uw patiënt contact op met onze klantenservice:

Telefoonnummer	0800-9776633
Vanuit het buitenland	+31 30 888 5819
E-mail	info@mylife-diabetescare.nl