



Instructiekaart eenmalig hervullen mylife YpsoPump Reservoir

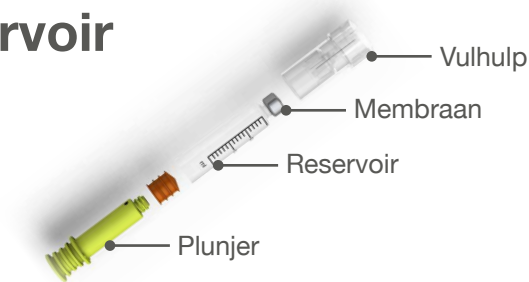

STAP 1


Wanneer het reservoir in uw pomp leeg is, opent u een nieuw reservoir en vult u eerst een nieuw reservoir. Volg de instructie bij afbeeldingen 1-9.

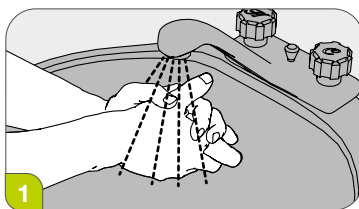

1 Was uw handen met water en zeep.




2 Reinig het membraan van de insulineflacon met een alcoholdoekje.

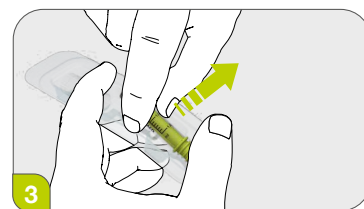


3 Open de verpakking en haal het reservoir en de vulhulp eruit. Raak het membraan niet aan.




4 Sluit de vulhulp aan op het nieuwe reservoir en duw de groene plunjer helemaal naar voren. Let op: prik het membraan van het reservoir niet meerdere keren door.

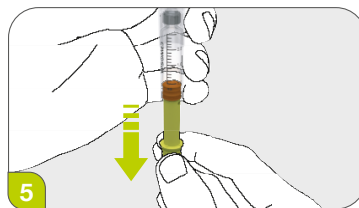


5 Trek de groene plunjer van het reservoir helemaal naar achteren, zodat het reservoir gevuld wordt met lucht.

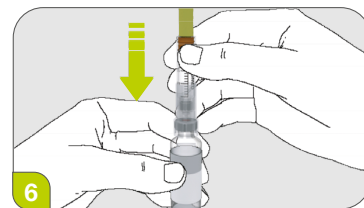


6 Sluit het andere uiteinde van de vulhulp aan op de insulineflacon.

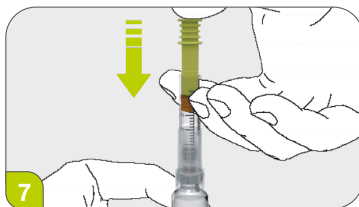

7 Duw de lucht met behulp van de groene plunjer weer uit het reservoir in de insulineflacon.

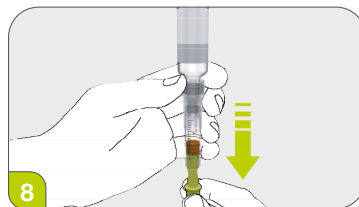

8 Draai het reservoir met de insulineflacon ondersteboven. Trek langzaam insuline in het reservoir.

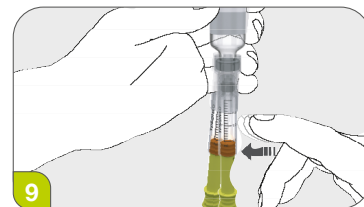

9 Controleer op luchtballen en lekkage.

- Tik zachtjes tegen het reservoir om luchtballen los te maken.
- Druk de groene plunjer voorzichtig in om de lucht te verwijderen.
- Herhaal dit als het nodig is.


Gebruik het reservoir niet als u een lek ziet.

STAP 2**Nieuw gevuld reservoir bewaren**


- Laat de vulhulp bevestigd aan de insulineflacon.
- Haal het reservoir van de vulhulp.
- Draai de groene plunjer los van het reservoir. Gooi de groene plunjer niet weg.
- Schrijf de vuldatum op het reservoir.
- Leg het gevulde reservoir in de koelkast.

STAP 3**Leeg reservoir eenmalig hervullen**


- Verwijder het lege reservoir uit de pomp.
- Maak het membraan van het lege reservoir schoon met een alcoholdoekje.
- Hervul het reservoir dan vervolgens volgens de volgende stappen:

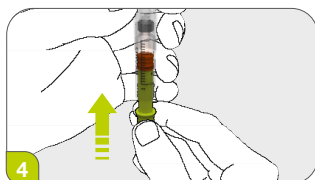


Sluit het reservoir aan op de vulhulp die nog op de insulineflacon zit. Draai de groene plunjer op het reservoir.

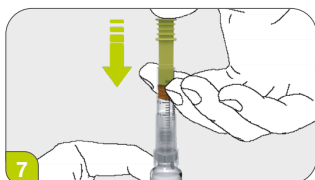

Duw de lucht met behulp van de groene plunjer weer uit het reservoir in de insulineflacon.

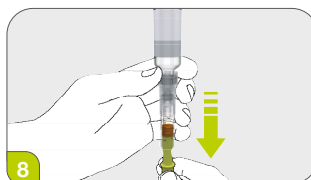

Draai het reservoir met de insulineflacon ondersteboven. Trek langzaam insuline in het reservoir.

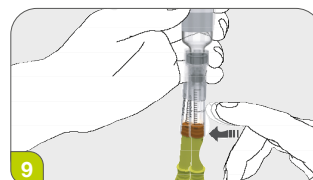

Controleer op luchtbelletjes en lekkage.

- Tik zachtjes tegen het reservoir om luchtbelletjes los te maken.
 - Druk de plunjer voorzichtig in om de lucht te verwijderen.
 - Herhaal dit als het nodig is.
- Gebruik het reservoir niet als u een lek ziet.

- Haal vervolgens het reservoir van de vulhulp.
- Draai de groene plunjer los van het reservoir.
- Plaats het hervulde reservoir terug in de pomp.
- Verwijder de vulhulp van de insulineflacon.
- Gooi de groene plunjer en de vulhulp weg.

STAP 4**Wisselen van reservoir**

Is het hervulde reservoir opnieuw leeg? Gooi dit reservoir dan weg. U mag een reservoir maar één keer hervullen.

- Vul uw pomp met het gekoelde, nieuw gevulde reservoir uit stap 2.
- Wanneer dit reservoir leeg is, begint het proces opnieuw, ga terug naar stap 1, vul een nieuw reservoir en hervul uw lege reservoir.

**Disclaimer**

- Het reservoir mag één keer worden hervuld binnen 7 dagen na de 1e keer vullen.
- Plaats het hervulde reservoir direct terug in de pomp.
- Bewaar een hervuld reservoir nooit in de koelkast.

i