



Checklist

Diabetesverpleegkundige (1/2)



Loop
CamAPS IFX

Gebruik dit formulier om uw patiënt goed voor te bereiden op de instructie. Deze Checklist helpt u bij de stappen vanaf pompaanvraag tot en met de start op insuline.

1 Check voorafgaande aan de keuze voor mylife Loop of de patiënt het systeem kan gebruiken.

- a** Patiënt gaat systeem als HCL gebruiken en heeft een Android smartphone met een besturingssysteem dat compatible is met de CGM sensor

Check via mylife-diabetes.info of via de QR-code

Patiënt heeft
een Dexcom
G6 sensor



Patiënt heeft
een Freestyle
Libre 3 of
Freestyle Libre 3
Plus sensor



- b** Patiënt gaat gebruik maken van YpsoPump Inset (soft) of mylife Orbit Micro (staal) infuussets
- c** Patiënt gaat zelf ampullen vullen m.b.v. de mylife YpsoPump Reservoirs

2A Doe de aanvraag in het portaal van de Medische Speciaalzaak:

- a** Bestel de mylife YpsoPump ☐
- b** Bestel de Dexcom G6 of FSL3 sensoren (indien nodig) ☐
- c** Bestel de mylife Orbit Micro (staal) of YpsoPump Inset (soft) infuussets ☐
- d** Bestel de mylife YpsoPump Reservoirs om ampullen te kunnen vullen ☐
- e** Selecteer soort instructie ☐
 - o Online (E-learning)
 - o Thuis (E-learning met begeleiding)
 - o Polikliniek (E-learning met ziekenhuisinstructie)
- f** Vraag aan en motiveer indien Patiënt een 3 maanden ervaringsperiode nodig heeft ☐
 - I.g.v. Bosman in hun aanvraagportaal door deze optie te selecteren
 - I.g.v. Mediq via www.mylife-diabetes.info, (wachtwoord Ypsomed!), menu 'Ervaringsperiode'





Checklist

Diabetesverpleegkundige (2/2)



Loop
CamAPS I FX

2B Verstrek Patiënt het volgende:

- a Het 'Formulier Therapiegegevens' ingevuld met de gevraagde gegevens ☐
- b Een (recept voor een) 2-tal kunststof ampullen zoutoplossing 10 ml ☐
- c Een spuit met luerlock aansluiting met bijpassende naald ☐
- d Een recept 10 ml flacons insuline om zelf Reservoirs mee te vullen ☐

3 Patiënt is minimaal 1 week voor de start met insuline gestart met de sensor ☐

4 **E-learning instructie of E-learning met Begeleiding instructie:**
"De patient heeft mij gebeld voor het plannen van de start met insuline (pompstart)" ☐

E-learning met Ziekenhuisinstructie:
"De instructeur heeft i.o.m. mij een datum voor de instructie in het ziekenhuis gepland" ☐

5 Tijdens de therapiestart met insuline: ☐

- heeft de patient het certificaat van de mylife YpsoPump e-learning aan mij overlegd
- zijn de basaalstanden in de pomp gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd
- zijn de boluscalculator settings gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd
- zijn de alarmen/meldingsinstellingen gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd

6 Nadat u de therapie met insuline gestart heeft, bent u klaar. De patiënten kunnen thuis aan de hand van het Stappenplan dat zij ontvingen, de pomp en sensor koppelen met de app. Zij kunnen onze Klantenservice bellen, mocht het koppelen niet lukken. Wij zorgen dat het systeem werkend wordt.