



Gebruik van mylife CamAPS FX op school, het kinderdagverblijf of bij oppassen

mylife CamAPS FX is een geavanceerd insulinetoedieningssysteem voor mensen met diabetes type 1 dat zeer eenvoudig te gebruiken is.

- mylife CamAPS FX is een app die continu de insulinetoediening aanpast via de mylife YpsoPump-insulinepomp, op basis van de ontvangen glucosesensorgegevens.
 - Om te werken moet deze via Bluetooth® verbonden zijn met de insulinepomp en sensor; de telefoon met de app moet zich dus binnen een afstand van zes meter van de persoon bevinden.
- Mensen die het systeem gebruiken, moeten nog steeds koolhydraten tellen in maaltijden en snacks en een insulinebolus toedienen via de mylife CamAPS FX-app (idealiter 10–15 minuten voor het eten).
- Vraag om individueel advies van de ouders en het diabetesteam van het kind/de jongere waar u ondersteuning aan geeft.

Online-training

- Gratis online competentiegerichte training voor docenten en verzorgers is hier beschikbaar: www.camdiabtraining.com.
- Het wordt aanbevolen dat kinderoppassers, verzorgers of leraren de essentiële “mylife CamAPS FX-training voor scholen” voltooien, om hen te helpen vertrouwd te raken met het gebruik van mylife CamAPS FX.
- Deze essentiële training duurt gemiddeld 30 minuten en levert na voltooiing een competentiecertificaat op.
- Neem contact op met het diabetesteam van die persoon als u verdere ondersteuning nodig heeft.



Meer vrijheid. Meer vertrouwen. Met mylife.



Ypsomed®

Virtuele training op de mylife CamAPS FX-app

- U kunt de mylife CamAPS FX-app downloaden van de Google Play Store en deze koppelen aan een virtuele pomp en virtuele CGM om hem in demomodus te gebruiken.
- Zo kunt u oefenen met functies zoals “Boost”, “Ease-off” en insuline toedienen via de boluscalculator.

Volgen op afstand

- Volgen op afstand met Companion: met de mylife CamAPS FX-app kunnen de gegevens van de gebruiker worden gedeeld met maximaal 10 “companions”. Volgen op afstand is geïntegreerd in de app en daarom downloaden zowel de gebruiker als de “companion” de mylife CamAPS FX-app op hun Android-smartphone. Bij volgen op afstand met Companion wordt een afspiegeling van de gegevens uit de mylife CamAPS FX-app van de gebruiker beschikbaar gesteld. Die gegevens worden iedere minuut ververs (CGM-gegevens, insulinegegevens, meldingen) of om de vijf minuten (overige gegevens) via de mylife CamAPS FX-app van de “companion” van de gebruiker. Voor het delen van gegevens met “companions” is een internetverbinding nodig.
- Sms-gebaseerd volgen op afstand: de mylife CamAPS FX-app ondersteunt sms-gebaseerd volgen op afstand.
Alle waarschuwingen en meldingen van de app worden per sms-bericht naar 5 “volgers” gestuurd. Gebruikers moeten een sim-kaart hebben waarmee sms-berichten kunnen worden verstuurd vanaf hun telefoon. Wij raden aan om te controleren of de gekozen bundel sms-functionaliteit omvat.
- Zowel Companion als volgen op afstand via sms kunnen in het menu “Delen” worden gedeactiveerd als ze niet nodig zijn in de mylife CamAPS FX-app van het kind/de jongere.



Download de mmol/L app



Download de mg/dL app



Vrijwaringsclausule: De afbeeldingen van de producten dienen alleen ter illustratie. // mylife en Ypsomed zijn geregistreerde handelsmerken van Ypsomed AG. // CamAPS is een geregistreerd handelsmerk van CamDiab Ltd. // Dexcom en Dexcom G6 zijn geregistreerde handelsmerken van Dexcom, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. // FreeStyle, Libre en daaraan gerelateerde merken zijn handelsmerken van Abbott en worden gebruikt met toestemming. // Het woordmerk Bluetooth® en bijbehorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., voor gebruik hiervan door Ypsomed is een licentie verleend. // Andere productnamen en handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.

Voor het veilig gebruiken van genoemde producten verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing of www.mylife-diabetescare.nl/veiligheid